

## KaVo sugrengöring



DEKASEPTOL Gel är ett säkert, snabbt och billigt sätt att desinficera och rengöra sugsystemet.

DEKASEPTOL Gel är en färdig brukslösning som gör att man slipper tidsödande spädning och omständiga rutiner.

Dosering sker enkelt från enlitersflaskan. Med ett tryck på doseringspumpen matas exakt rätt doseringsmängd fram.

DEKASEPTOL Gel är ett miljövänligt medel utan formaldehyd, fenol eller klor. Den aktiva substansen är istället glukoprotamin – utvunnet ur kokosmjölk.

Bassats	3 x 1 liter, 1 st doseringspump
Doseringspump	
Refill	1 x 6 liter, dunk
Dunkkran för refill	

Art.nr

<b>1.000.7204</b>
<b>1.000.7206</b>
<b>1.000.7205</b>
<b>0.224.6876</b>

### Salivsugslang och grovsugslang



1. Sug upp kallt vatten stötvís, t ex med KaVo AQUAmat® eller ur en plastmugg



2. Tryck ned doseringsanordningen en gång, med sugadaptorn eller för hand



3. Sug upp DEKASEPTOL Gel ur doseringsanordningen\*  
\*Med grovsugslangen upprepas steg 1-3



4. Sätt tillbaka slangen

### Fontänskål



1. Tryck ned doseringsanordningen en gång



2. Häll DEKASEPTOL Gel i fontänskålen



3. Sprid DEKASEPTOL Gel med en borste och låt det verka



4. Borsta och skölj

## Diskmedel



### Thermoton NR

Flytande diskmedel för diskdesinfektorer. 5 l/fp.

**1.006.3548**

### Suma Base Free M4

Diskmedelspulver för diskdesinfektorer. 1,5 kg/fp.

**1.006.9160**

## Tork/sköljmedel



Suma Med Rinse Plus  
5 l/tp.

Art.nr

1.006.4429

## Dörr Hygien

Vad ska skötas?

Med vad ska det skötas?

Sugsystemet	Orotol-Plus	1 x 2,5 l	K	0.998.0581
	OroCup	blandningsflaska		0.998.0097
Stolen & uniten	FD 333	1 x 2,5 l	K	0.998.0580
	Sprayflaska			0.998.1128
	FD 350	90 st. dukar	B	0.998.0689
	FD 360	1 x 500 ml	B	1.005.7706
Handinstrument	ID 212 forte	1 x 2,5 l	K	0.998.1421
Roterande instrument	ID 220	1 x 2,5 l	K	0.998.0646
Väggar & bänkytor	FD 312	1 x 2,5 l	K	0.998.1422
Avtrycksmaterial & protesarbeten	MD 520	1 x 2,5 l	K	0.998.0519
	Burk för 2 st avtryck			1.002.7960
	Box för 6 st avtryck			0.998.1140
Händerna	HD 410	1 x 2,5 l	B	1.003.6119

B = Brukslösning

K = Koncentrat



Orotol-Plus



OroCup



FD 333



Sprayflaska



FD 350 90 st dukar



FD 360



ID 212 forte



ID 220



FD 312



MD 520



Burk för 2 st avtryck



Box för 6 st avtryck



HD 410